

## Entretien / Stockage

- › Stocker le produit à l'abri de l'humidité
- › Pour l'entretien, ne pas utiliser de solvants

## Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

*NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.*



### Désignation

Support de posture d'assise orthonormé (graduation des réglages des mains d'appui).

### Coloris de châssis



## Destination


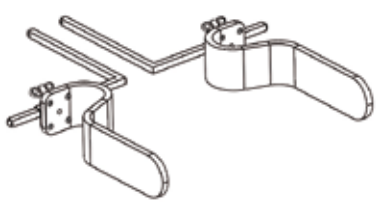
Le support de posture d'assise est une aide technique de mesure et de contrôle postural d'un patient lors de situations orthopédiques complexes.

Cet outil permet de rechercher le meilleur positionnement d'assise du patient, en tenant compte des actes de la vie quotidienne. C'est une aide indispensable au moment de la prise d'empreinte par un orthoprothésiste, en vue de la réalisation d'un corset-siège ou d'une assise de confort.

## Descriptif

- Support de posture d'assise orthonormé (graduation des réglages des mains d'appui)
- Transparence de l'ensemble des supports d'appui
- Réglages 3D :
  - Mains d'appui tronc
  - Repose-bras
  - Tête
  - Repose-pieds
  - Socle d'assise
- Déclive 20°
- Ouverture angle cuisses-tronc 30°
- Plastron de maintien
- Bac de rangement
- Base roulante
- Tableau taille et mesure limite de poids

## Pièces détachées

Qté	Visuel	Référence	Désignation
1		ZZ2-201	Ensemble tête
2		ZZ2-202	Ensemble mains d'appui tronc

## Protocole d'utilisation

### Préparation du matériel de prise d'empreinte

- Ajuster l'Ortho'SPA aux mesures du patient (utiliser une fiche mesure dédiée)
- Adaptation du coussin d'assise néoprène et dossier néoprène selon nécessité dans l'Ortho'SPA

### Installation du patient

- Vérifier le bon fonctionnement de l'Ortho'SPA au préalable
- Utiliser un maillot pottique (P81) et du jersey tubulaire (WB4) par dessus les vêtements. Cela permet de limiter les plis lors du scan, tout en conservant le volume
- Bien positionner le patient dans l'Ortho'SPA sur le coussin d'assise en adaptant l'abduction
- Une légère déclive aide au positionnement
- Régler l'angle cuisses-tronc
- Régler la hauteur et l'écartement des repose-pieds
- Régler la hauteur et la largeur des mains d'appui sous axillaire, taille lordose, trochanter.
- Régler la tête
- Régler les repose-bras pour écarter au mieux les bras du corps sans ascensionner les épaules
- Actionner la pompe électrique tout en modelant le coussin d'assise sur la partie fessière et la partie crurale. Débrancher la pompe
- Valider le bon positionnement avec l'équipe soignante

### Scanner

- Une fois le patient correctement positionné, effectuez le scan de face, de profil et de dos si vous n'utilisez pas de coussin dossier (les capteurs infrarouges permettent de scanner au travers de la transparence des mains d'appui)
- Retirer le patient de l'Ortho'SPA
- Scanner le coussin d'assise et le coussin de dossier selon l'utilisation en situation dans l'Ortho'SPA

### Modélisation

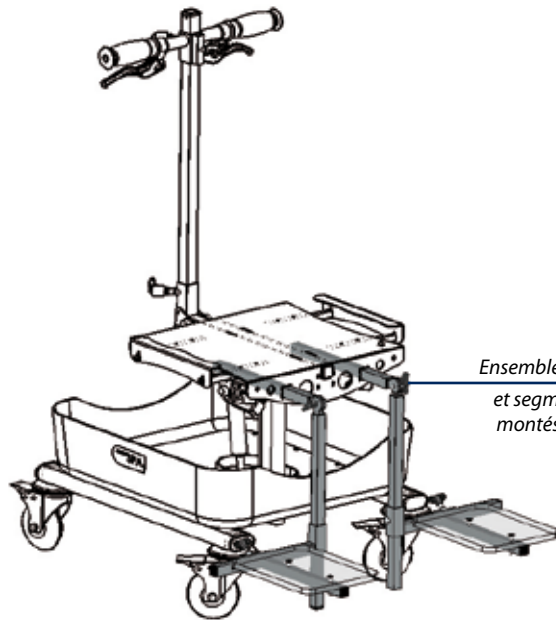
- Récupérer et modéliser les formes 3D dans votre logiciel de CFAO

## Compatibilité

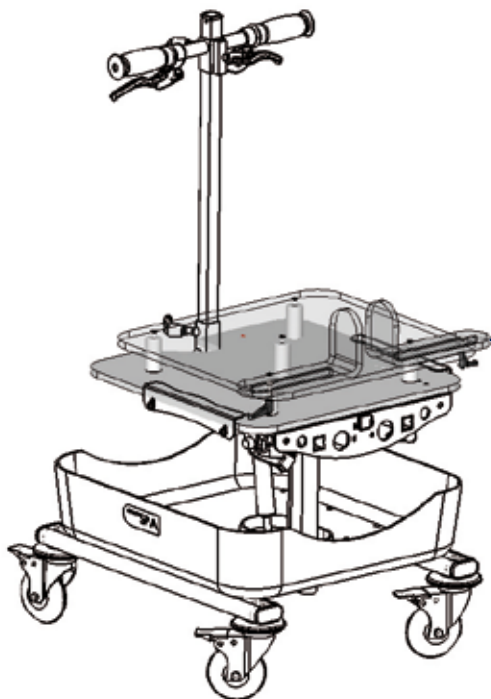
Sacs à bille.

## Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

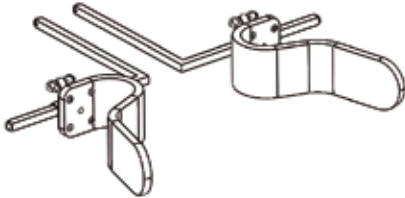
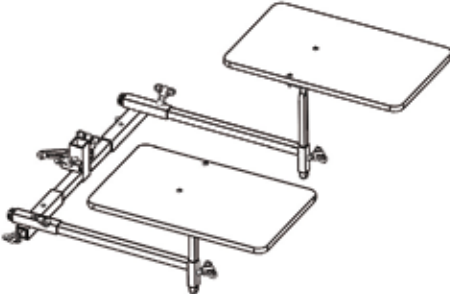

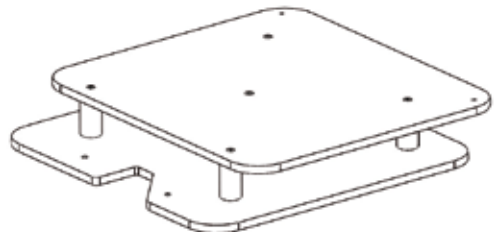

- L'Ortho'SPA doit être utilisé dans la limite de poids conseillée de 130 kg
- Nous recommandons l'utilisation dans un cadre médicalisé lors de la recherche d'une posture d'assise ; ne pas laisser sans surveillance le patient.
- La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre d'utilisation
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

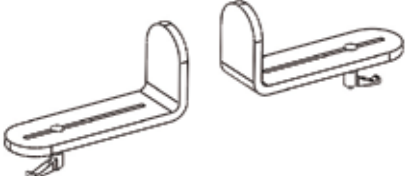
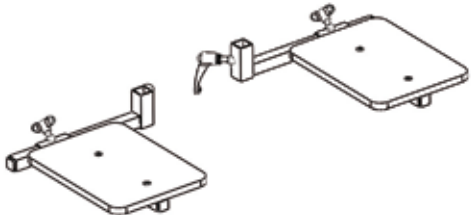


*Ensemble repose-pieds  
et segments jambiers  
montés sur le châssis*



*Plateau et équerres  
d'abduction  
montés sur le châssis*

Qté	Visuel	Référence	Désignation
1		ZZ2-203	Ensemble mains d'appui trochanter
1		ZZ2-204	Ensemble repose bras
1		ZZ2-205	Segments jambiers
1		ZZ2-206	Ensemble plateau
2		ZZ2-207	Coulisse mains d'appui

Qté	Visuel	Référence	Désignation
1		ZZ2-208	Ensemble équerre abduction
1		ZZ2-209	Paire de repose-pieds

### Protocole de montage

**Important !**

Toutes les pièces comportant des stickers **verts** se situent à droite et toutes celles comportant des stickers **rouges** se situent à gauche lors du remontage.

