



Description


- ↪ S'installe sur une emboîture déjà réalisée (épaisseur de parois de 4 à 12 mm)
- ↪ Procédure de montage très simple, sans outillage spécifique
- ↪ Débit d'air constant
- ↪ Valve avec bouton poussoir de dépressurisation
- ↪ Faible encombrement
- ↪ Démontage et nettoyage très facile

Installation

- ↪ Déterminer la position souhaitée de la valve sur l'emboîture. A l'aide d'un foret de 8 mm, percer perpendiculairement la paroi de l'emboîture, puis tarauder à 10-150. Visser la valve et agrafer à la ponceuse l'excédant de filetage à l'intérieur de l'emboîture.
- ↪ Dévisser la valve, nettoyer le filetage. Appliquer la colle fournie ("ESP SILICONE SEALANT") sur le filetage et revisser la valve dans l'emboîture en serrant fermement à la main.

Démontage et nettoyage

- ↪ Insérer un tournevis fin sous le bouton poussoir afin de le dégager
- ↪ Retirer le ressort
- ↪ Ouvrir le corps de la valve à l'aide d'un couteau
- ↪ Retirer la membrane et le mécanisme de bouton poussoir
- ↪ Nettoyer au savon doux puis sécher à l'air comprimé

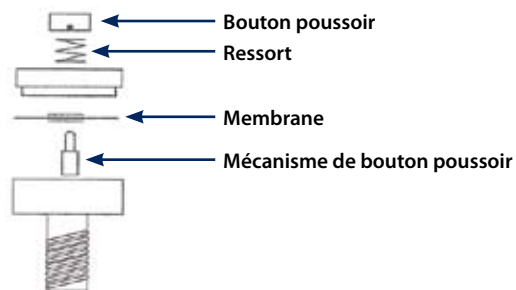

Description

- ↪ S'installe sur une emboîture déjà réalisée (épaisseur de parois de 4 à 12 mm)
- ↪ Procédure de montage très simple, sans outillage spécifique
- ↪ Débit d'air constant
- ↪ Valve avec bouton poussoir de dépressurisation
- ↪ Faible encombrement
- ↪ Démontage et nettoyage très facile

Installation

- ↪ Déterminer la position souhaitée de la valve sur l'emboîture. A l'aide d'un foret de 8 mm, percer perpendiculairement la paroi de l'emboîture, puis tarauder à 10-150. Visser la valve et agrafer à la ponceuse l'excédant de filetage à l'intérieur de l'emboîture.
- ↪ Dévisser la valve, nettoyer le filetage. Appliquer la colle fournie («ESP SILICONE SEALANT») sur le filetage et revisser la valve dans l'emboîture en serrant fermement à la main.

Démontage et nettoyage

- ↪ Insérer un tournevis fin sous le bouton poussoir afin de le dégager
- ↪ Retirer le ressort
- ↪ Ouvrir le corps de la valve à l'aide d'un couteau
- ↪ Retirer la membrane et le mécanisme de bouton poussoir
- ↪ Nettoyer au savon doux puis sécher à l'air comprimé

